

Rapid tests COVID-19



αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις





► Rapid test αντιγόνου SARS-CoV-2

- Ελέγχει αν το άτομο μεταφέρει τώρα τον ιό οπότε μπορεί και να τον μεταδώσει. Το τεστ αντιγόνου γίνεται με δείγμα επιχρίσματος από την μύτη.

► Rapid test αντισωμάτων SARS-CoV-2 IgM/IgG


- Ελέγχει αν το άτομο έχει ήδη «Περάσει» τον ιό οπότε έχει αναπτύξει αντισώματα και (σχετική) ανοσία. Το τεστ αντισωμάτων γίνεται με δείγμα αίματος από το δάχτυλο.
- Προϊόντα co-marketing με την εταιρία Vivachek Laboratoire.

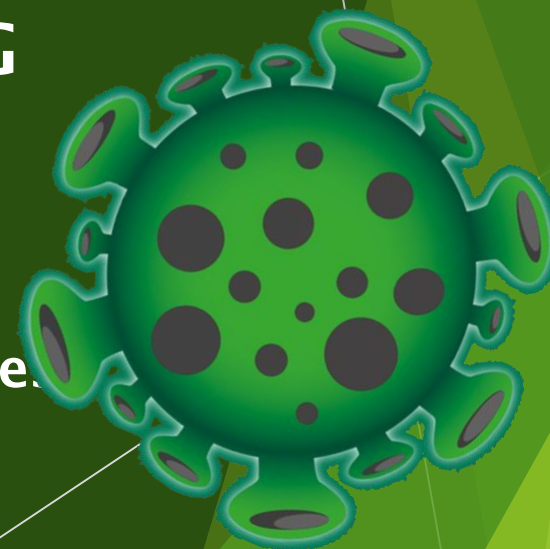

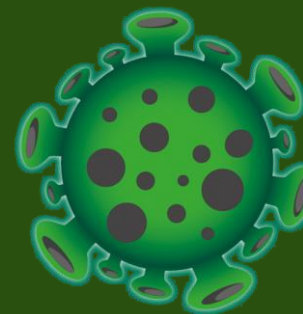

► Rapid test αντιγόνου Wellion VivaDiag SARS-CoV-2

- Συσκευασία 25 τεμαχίων (με δυνατότητα διαμερισμού)
- Ατομική συσκευασία

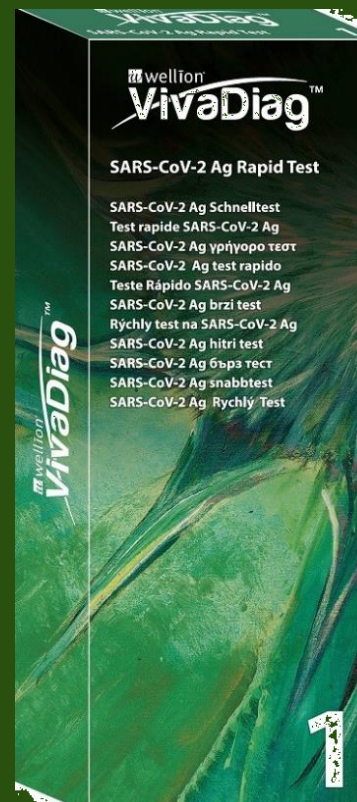




► Rapid test αντιγόνου SARS-CoV-2

► Χαρακτηριστικά :

- Χρησιμοποιούνται για αυτομέτρηση (self tests) στην Αυστρία, Τσεχία, κ.α.
- ανιχνεύουν το αντιγόνο του ιού SARS-CoV-2
- έχουν έγκριση CE-IVD και είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
- εκτελούνται σε δείγματα ρινικού, φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
- παρέχουν αποτέλεσμα εντός 15 λεπτών.
- έχουν ένδειξη εγκυρότητας εκτέλεσης της δοκιμασίας
- δύνανται να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία 2 έως 30 C.
- Ειδικότητα: 100% (δεν δίνει ψευδώς θετικά αποτελέσματα)
- Ευαισθησία: 95,04%
- Κλινική ακρίβεια: 98,91%
- Καμία διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με άλλους ιούς.

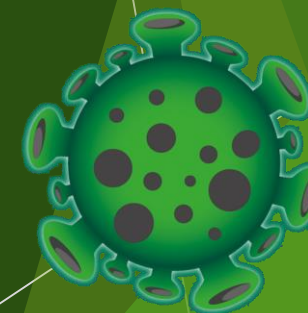




► Rapid test αντιγόνου SARS-CoV


► Περιεχόμενα συσκευασίας 25 τμχ:

- 25 Τεστ (συσκευές μέτρησης) εντός ατομικής συσκευασίας
- 25 αποστειρωμένα μάκτρα εντός ατομικής συσκευασίας
- 25 σωλήνες εξαγωγής
- 25 καπάκια για σωλήνες
- 25 ατομικά φιαλίδια προ γεμισμένα με διάλυμα εκχύλισης
- 25 ένθετα συσκευασίας
- 1 βάση σωλήνων

VivaDiag™ SARS-CoV-2 Ag Rapid Test

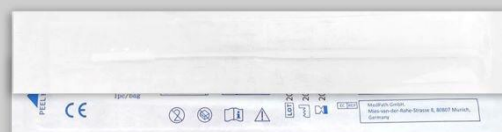

*25 sterile swabs

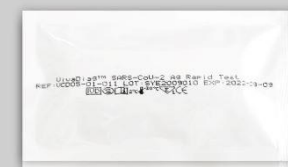


*25 test devices




*25 extraction tubes



*25 tube tips

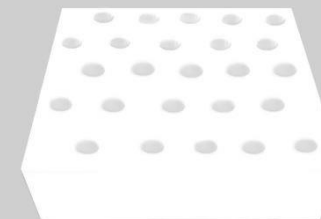

*1 tube stand

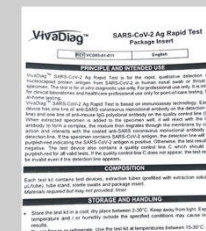

*25 package inserts



25 sealed pouches
(prefilled with 300 µL extraction solution)




► Rapid test αντιγόνου SARS-CoV-2

► Διαδικασία μέτρησης:

1. Συλλογή δείγματος:



ρινικού

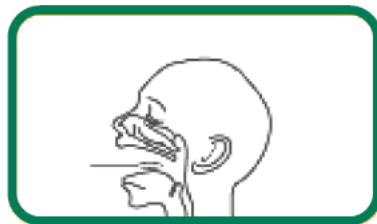


Οροφαρυγγικού





Ρινοφαρυγγικού

2. Μεταχείριση δείγματος, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
<https://www.youtube.com/watch?v=zPdRuF7-ztA>

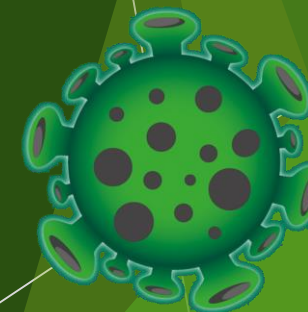



- ▶ Rapid test αντιγόνου SARS-CoV-2
- ▶ 3. Ανάγνωση αποτελέσματος σε 15 λεπτά:

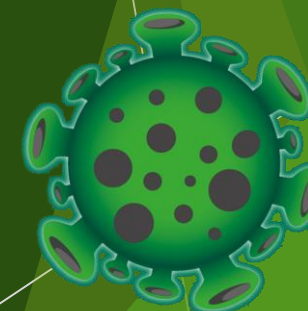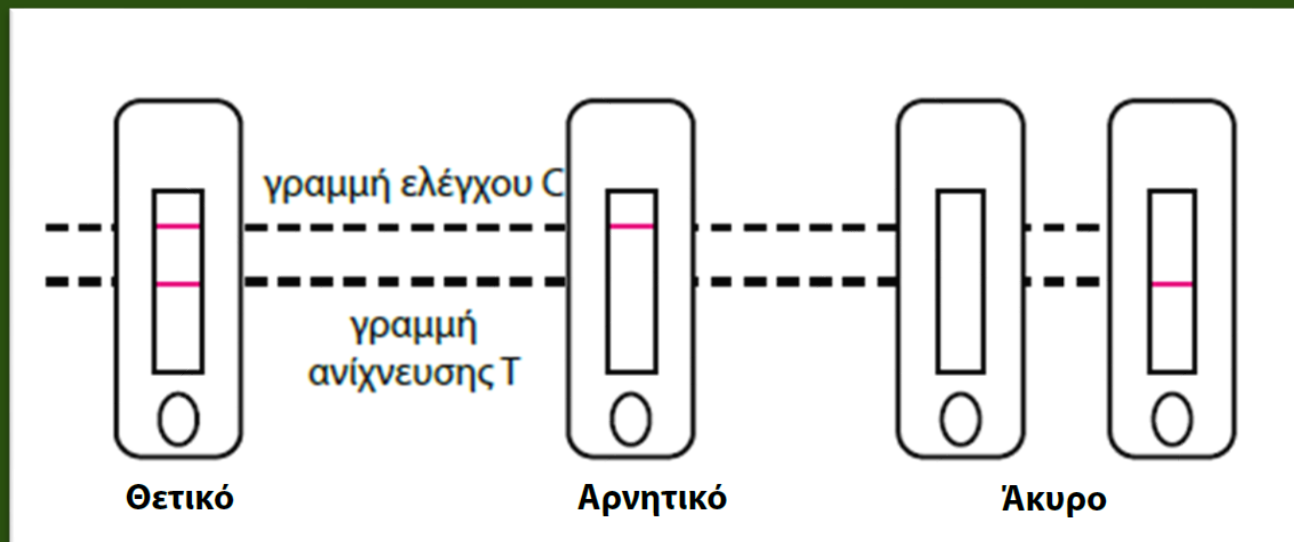



We endeavour to make life easier for patients and partners.

Through innovative ideas, advice and service.